

Инструкция по применению

Состав

Calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum.

Лекарственная форма

Крем для фиксации зубных протезов

Описание

Надежная фиксация зубного протеза придаст вам уверенности и позволит заботиться о более важных вещах. Крем для фиксации зубных протезов Корега Нейтральный вкус повышает качество жизни людей, использующих зубные протезы. Удобный плоский наконечник тюбика позволит наносить крем на протез более аккуратно и точно.

Действие

Крем Корега обеспечивает надежную фиксацию в течение всего дня, предотвращает смещение протеза в полости рта и попадание частичек пищи даже под хорошо припасованный протез, позволяя вам говорить, есть и улыбаться уверенно!

Показания к применению

Фиксация зубных протезов

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость.

Применение при беременности и кормлении грудью

не противопоказано

Применение у детей

Противопоказан в детском возрасте

Побочные действия

Аллергические реакции. Прекратите использование в случае появления раздражения.

Взаимодействие

Использование препарата не влияет на действие, адсорбцию и метаболизм других лекарственных препаратов.

Способ применения и дозы

Как зафиксировать протез:

Наносите крем 1 раз в день на сухой и чистый протез короткими полосками, как показано на рисунках.

Прополощите рот теплой водой перед фиксацией, вставьте протез в ротовую полость, плотно прижмите и сомкните челюсть для лучшей фиксации.

Как извлечь протез:

Прополощите рот теплой водой и затем медленно извлеките протез из полости рта.

При помощи теплой воды и зубной щетки с мягкой щетиной удалите остатки крема с поверхности зубных протезов и изо рта.

Особые указания

Некоторые люди могут быть чувствительны к компонентам крема. При появлении необычных или неприятных ощущений, необходимо прекратить использование крема и проконсультироваться с врачом-стоматологом. Проглатывание небольших количеств крема, если он используется согласно инструкции по применению, безвредно.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и движущимися механизмами.

Форма выпуска

Крем для фиксации зубных протезов

туба 40мл

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30°C.

Срок годности

3 года

Производитель и организация, принимающие претензии потребителей

Стаффорд Миллер Лтд, Ирландия